

Инструкции по определению размера трейнера LM – Activator

LM

почувствуй
разницу

- Оптимальным вариантом будет использование измерительной линейки LM-OrthoSizer.
- Держите линейку LM-OrthoSizer за ручку или закрепите ее на ручке стоматологического зеркала.
- Выступающий маркер на правой стороне линейки должен располагаться между вторым резцом и клыком с левой стороны верхней челюсти.
- Размер трейнера LM-Activator считывается с контактного пункта между вторым резцом и клыком на правой стороне верхней или нижней челюсти.
- Необходимо принять во внимание, что в ходе лечения при сменном прикусе зубная дуга увеличится. Мы рекомендуем использовать трейнера на 1-2 размера больше, чем получилось по результатам измерений.
- Измерительная линейка может быть стерилизована в автоклаве.




Можно использовать одноразовую бумажную линейку.



Повторно подбирать размер трейнера следует при прорезывании вторых резцов нижней и верхней челюстей. Возможно, потребуется использовать трейнер большего размера. При определении размера необходимо учитывать наличие скученности зубов или, наоборот, диастем (трем). В зависимости от патологии используется тренер большего или меньшего размера, чем получилось по результатам измерений.

Измерительная таблица LM – Activator

Данная таблица поможет подобрать трейнер если у вас нет под рукой измерительной или одноразовой бумажной линейки.

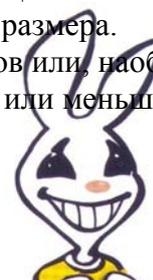

НИЗКАЯ МОДЕЛЬ (13 размеров)		ВЫСОКАЯ МОДЕЛЬ (11 размеров)		ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ	НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
Номер	Код	Номер	Код	Расстояние (мм)	Расстояние (мм)
10	LM 94010L			24.8 - 25.9	18.8 - 19.5
15	LM 94015L			26 - 27.1	19.6 - 20.3
20	LM 94020L	20	LM 94020H	27.2 - 28.3	20.4 - 21.1
25	LM 94025L	25	LM 94025H	28.4 - 29.5	21.2 - 21.9
30	LM 94030L	30	LM 94030H	29.6 - 30.7	22 - 22.7
35	LM 94035L	35	LM 94035H	30.8 - 31.9	22.8 - 23.5
40	LM 94040L	40	LM 94040H	32 - 33.1	23.6 - 24.3
45	LM 94045L	45	LM 94045H	33.2 - 34.3	24.4 - 25.1
50	LM 94050L	50	LM 94050H	34.4 - 35.5	25.2 - 25.9
55	LM 94055L	55	LM 94055H	35.6 - 36.7	26 - 26.7
60	LM 94060L	60	LM 94060H	36.8 - 37.9	26.8 - 27.5
65	LM 94065L	65	LM 94065H	38 - 39.1	27.6 - 28.3
70	LM 94070L	70	LM 94070H	39.2 - 40.3	28.4 - 29.1

Эксклюзивный представитель в Украине

СП «Промед», ул. Лысенка 4а, Киев, 01034, Украина

Тел: 044 278-64-76, 050 446-39-67

E-mail: admin@promed.ua www.promed.ua

